



Rightest CARE App

为你提供了极佳的个人化血糖管理方案，它可以帮助你轻松做好数位行动化的血糖管理分析。



完整详细血糖纪录



个人化设定



贴心客服及操作学习功能



搭配

「Rightest CARE App」

轻松血糖管理维持健康

瑞特血糖机深受专业信赖

多家医学中心与医院使用

BIONIME

华广生技股份有限公司
40242 台中市南区大庆街二段100号
E-mail: info@bionime.com



cn.bionime.com

T1905

RIGHTEST
瑞特


智能控糖 自在乐活

瑞特血糖监测系统

GM700SB

加密云端

Bluetooth

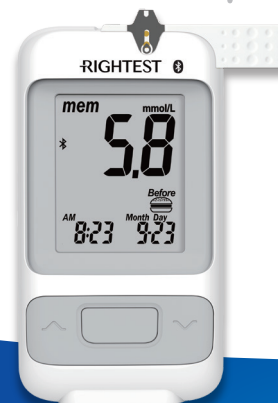

華廣生技

GM700SB 血糖仪

丢掉纸笔! 智慧蓝牙血糖机搭配App
让你轻松做好数位化血糖管理



蓝牙无线传输
搭载血糖管理App
轻松做好数位化血糖管理



独家创新
黄金电极试片结构
创新设计批批精准, 大片好拿
好用



动脉, 静脉, 微血管与
新生儿全血皆可测
建议由医护人员采得多种血样
检测弹性更方便



自动调码设计
试片插入即校正
免去手动校正, 方便准确



可标示
餐前或餐后血糖测值
轻松分类检测数值, 血糖意义
不混淆



极端血球容积族群
如贫血或新生儿皆适用
血球容积比可应用范围宽广
建议由专业医师判定使用

简易操作步骤



1 将测试片插入上方凹槽, 血糖机自动开机与校正, 选取标记符号并按确认键。



2 当血滴符号 闪烁时, 请将血样对准试片入口口。



3 快速
5秒钟得到测试结果。



4 安全
避免直接接触血样。



GM700SB 规格

血糖测试片	GS700
调码方式	自动调码校正
测量原理	葡萄糖脱氢酶, 电化学式
检测血样	微血管, 动脉, 静脉以及新生儿全血
血样量	0.75 微升 (0.00075 c.c.)
血球容积	血糖 ≤ 200mg/dL 时, HCT 范围 20 - 70% 血糖 > 200mg/dL 时, HCT 范围 20 - 60%
测量范围	10 - 600mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L)
血糖测试仪尺寸	82.0 x 45.0 x 15.5 mm (3.22 x 1.77 x 0.61 inch)
血糖测试仪重量	43.0 ± 5g (含电池)
电力供应	1颗 CR2032 电池
记忆容量	500 笔测试结果含时间及日期
操作温度	6 - 44°C (43 - 111°F)
操作相对湿度	10 - 90%
血糖测试仪保存条件	-10 - 60°C (14 - 140°F)
血糖测试片保存条件	4 - 30°C (39 - 86°F), < 90% 相对湿度

